

Інструкція з експлуатації

АЗМ-Х (LAN Storage)

Стоматологічна цифрова інтраоральна камера «BAUER'S CAM», дротова модель, з монітором



 Виробник	ZHUNAI AICREATE MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD, юридична адреса : поверх 3, Науковий Парк Лонсін , будинок №8, Чангсинь Роуд , Тангджиа , Жухай , Гуандонг , 519080, Китай; фактична адреса : 9/F, Будинок 3, Блок А, Ге Чуанг Сінь Гу, №625, 5-та Роуд Сіньша , Танцзявань , Зона високих технологій., Жухай , Гуандонг , Китай, 519080, електронна пошта : sales@aicreate-tech.com , тел .: +86 756 3399309;
Уповноважений представник виробника в Україні	ТОВ «БАУЕРС МЕДИКАЛ ГРУП», Україна, 49033, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, проспект Богдана Хмельницького, буд. 147, e-mail : info@bauers.com.ua, тел .: +38 067 968 56 81
Гарантійний термін 12 місяців з моменту монтажу	
З питань гарантійного та сервісного обслуговування звертайтеся до уповноваженого представника в Україні	
Редакція 0 від 24.12.2024	


Особливості

- ◆ Підтримка зберігання в локальній мережі та на картці пам'яті TF.
- ◆ Модуль камери з мікролінзами високої роздільної здатності, головка камери закрита оптичним склом.
- ◆ Безкоштовне програмне забезпечення Iteethsee, користувач може обмінюватися зображеннями з ПК на екрані АЗМ-Х без проводів.
- ◆ Камера з автофокусом на відстані 15-30 мм.
- ◆ Патент на передачу зображення високої чіткості без втрат .
- ◆ 17-дюймовий монітор з роздільною здатністю 1280*1024.
- ◆ Кілька шаблонів відображення: повний екран, стоп-кадр, розділений на чотири екрани, порівняння подвійних екранів .
- ◆ 10 світлодіодів зі стандартною колірною температурою 5500 К для освітлення, з можливістю вимикання.
- ◆ Корпус камери виготовлений з харчового пластику.

Специфікація

Модель	АЗМ-Х
Джерело живлення	AC100V-240V до DC12V/2A
Вхідна потужність	4.5 ВА ~ 5,5 ВА
Автофокус об'єктива камери	15 мм ~ 30 мм
Робочий діапазон R	18 мм ~ 25 мм
Довжина кабелю	3.5 метрів
Довжина дроту	2 М
Формат зображення	JPEG
Кути огляду	62 градуси
Датчик зображення	Сенсор 1/4 CMOS
Роздільна здатність	1280*1024
Екран дисплея	Медичний дисплей 17 дюймів
Об'єктив камери	Макрооб'єктив високої чіткості зі скляним ущільненням
Підсвічування	10 світлодіодів; підтримується функція вкл/вкл
Кнопка камери	Силіконова клавіатура з функціональною сенсорною кнопкою

Комплектація

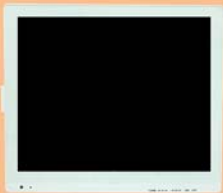Екран дисплея		Тримач для камери	
Камера		Пульт дистанційного керування	
Дріт		TF карта	
Живлення 220В (необов'язково)		TF картрідер	
Живлення 24В		Захисний футляр (50 шт.)	

Камера



1. Увімкніть живлення

Підключіть стоматологічний монітор за допомогою адаптера живлення, і система автоматично перейде в режим повноекранного перегляду .

2. Клавіша фіксації фото

- 1) Торкніться **клавіші фіксації фото** щоб відобразити зображення на екрані;
- 2) Знову торкніться **клавіші фіксації фото**, щоб зберегти зображення на екрані;
- 3) Коли зображення з'явилось на екрані, натисніть **клавішу розділення екрану 1/4**, ви зможете порівняти виведені на екран зображення із зображеннями, збереженими раніше. Затисніть **Клавішу переходу** для виходу з порівняння двох зображень
- 4) Коли зображення виведено на екрані, натисніть **клавішу переходу**, щоб видалити зафіксоване зображення;

3. Клавіша розділення екрану 1/4

- 1) У повноекранному режимі попереднього перегляду натисніть **клавішу розділення екрану 1/4** щоб увійти в режим 4 екранів, а потім постійно натискайте **клавішу переходу**, щоб зробити знімки;
- 2) У режимі 4 екранів натисніть **клавішу розділення екрану 1/4** щоб вийти з режиму 4 екранів.

4. Клавіша переходу


- 1) У повноекранному режимі натисніть **клавішу переходу**, щоб переглянути збережені зображення.
- 2) У режимі перегляду натисніть **клавішу розділення екрану 1/4** та **клавіша переходу** для переміщення зображень.
- 3) Під час перегляду зображення утримуйте **клавішу розділення екрану 1/4**, щоб видалити зображення. Натисніть **клавішу розділення екрану 1/4**, щоб підтвердити видалення зображення, натисніть **клавішу переходу**, щоб припинити видалення.
- 4) У режимі перегляду натисніть і утримуйте **клавішу переходу**, щоб вийти з режиму

перегляду.


5. Вкл / вкл підсвічування

- 1) Встановіть камеру на тримач, щоб вимкнути підсвічування; зніміть камеру з тримача, щоб підсвічування увімкнулося;
- 2) У режимі повноекранного перегляду натисніть і утримуйте **клавiшу переходу**, щоб увімкнути/вимкнути підсвічування.
- 3) Якщо камера не використовується протягом 5 хвилин, підсвічування камери автоматично вимкнеться, після натискання будь-якої клавiші підсвічування ввімкнеться.

Інтерфейси на моніторі

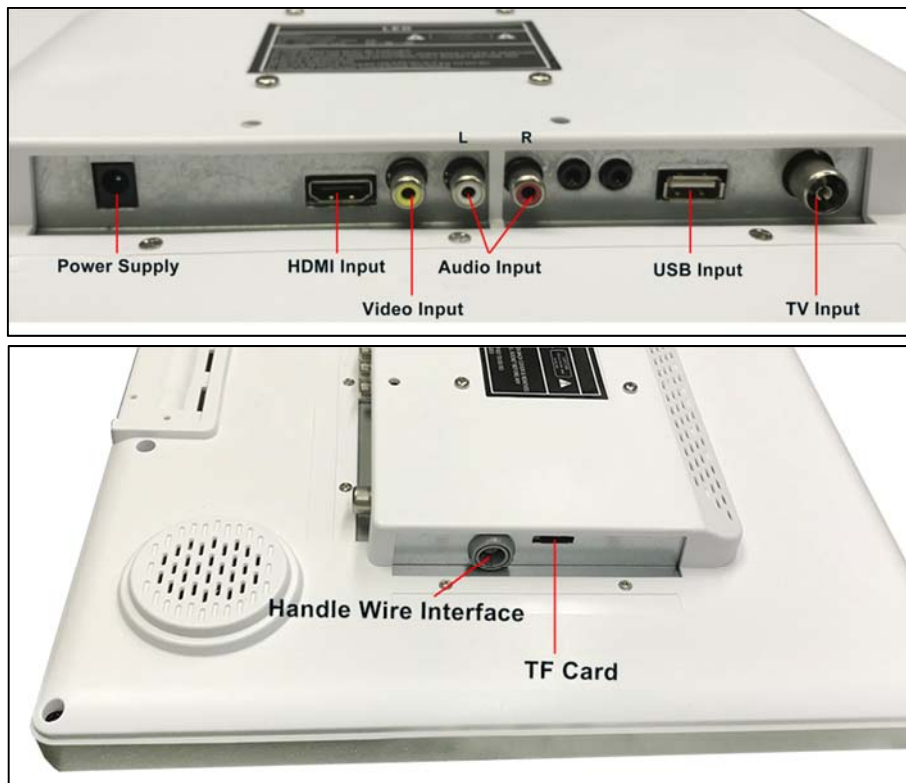

Відтворення мультимедіа на моніторі

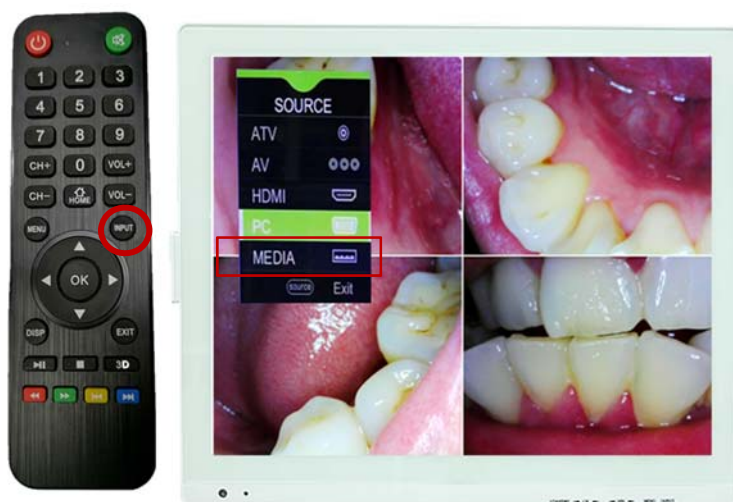


Скопіюйте мультимедійні файли (MP3, MP4, JPG) на USB-накопичувач, вставте його в стоматологічний монітор і увімкніть стоматологічний монітор.


Переключитися на відтворення мультимедіа: ВХІД→Медіа→Фото/Музика/Фільм/Текст
Перейти на внутрішньоротову камеру: ВХІД→ПК

Встановлення програмного забезпечення

1. Встановіть програмне забезпечення iTeethSee.exe на комп'ютер з операційною системою Windows.

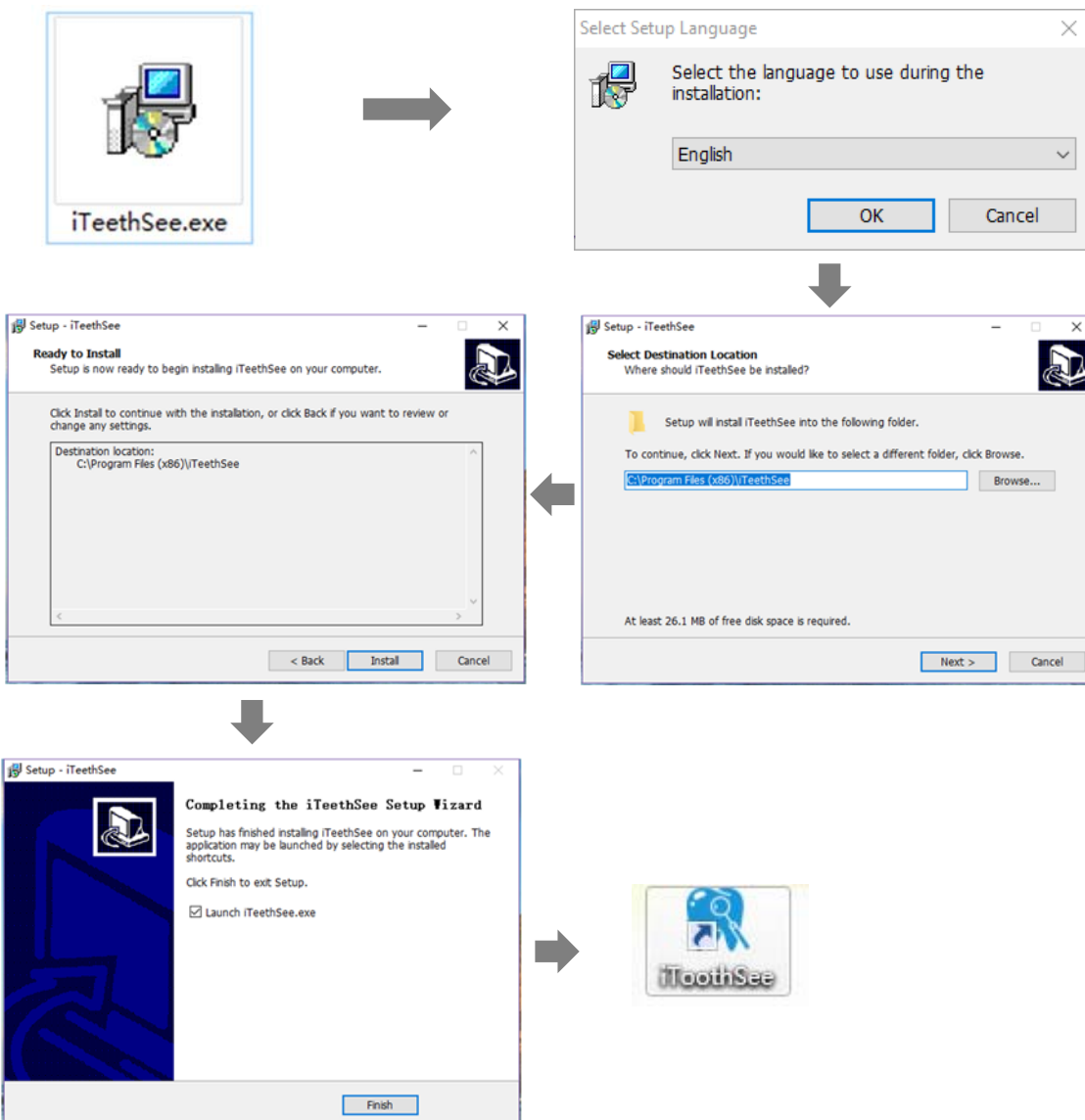

2. Запустіть програмне забезпечення Iteethsee.
Обліковий запис: Пароль адміністратора: 123

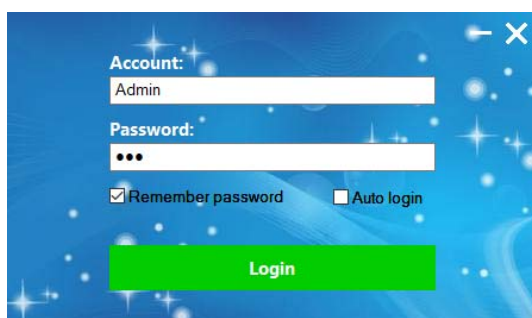


The login screen features a blue background with a starry pattern. It includes fields for 'Account:' (with 'Admin' entered) and 'Password:' (with three dots). There are checkboxes for 'Remember password' (checked) and 'Auto login' (unchecked). A large green 'Login' button is at the bottom.

Використання програмного забезпечення

Згенерувати QR-код Wi-Fi

Параметри --> QR(WiFi) --> Введіть обліковий запис WIFI та пароль (та сама локальна мережа вашого власного комп'ютера) --> Створити код

На екрані ви побачите QR-код. (Примітка: працює лише 2,4G Wi-Fi)

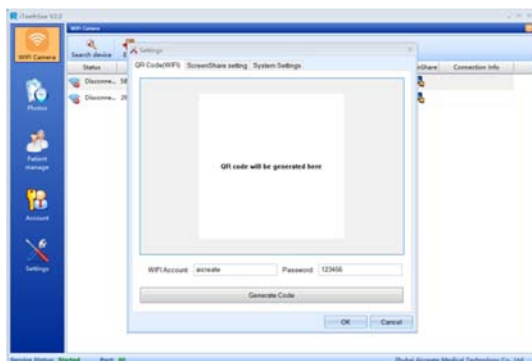


Підключіть монітор до Wi-Fi.

Увімкніть камеру, утримуйте клавішу розділення екрану 1/4, камера перейде в режим сканування, відскануйте QR-код, і монітор під'єднується до Wi-Fi, після успішного підключення на екрані з'явиться повідомлення «Підключення WIFI виконано успішно».

Підключіть монітор до ПК


Камера WIFI-->Пошук пристрою, комп'ютер шукатиме внутрішньоротову камеру, підключену до тієї ж локальної мережі. Натисніть «Підключити», щоб підключити камеру до ПК.

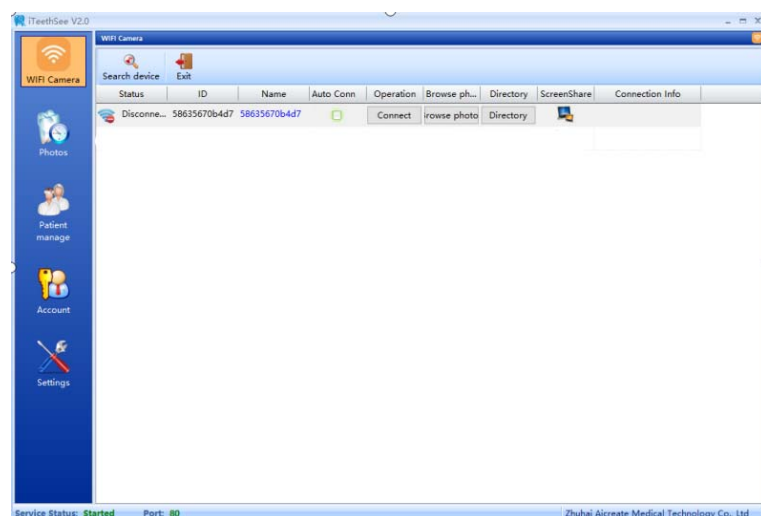

Тепер усі зроблені фотографії будуть автоматично збережені на ПК.


Перейменуйте камери в програмному забезпеченні IteethSee

Зауважте, що одне програмне забезпечення може підключати більше ніж 1 камеру, і щоб чітко їх визначати, ви можете змінити назву кожної камери для кращого керування. Натисніть на назву камери, і ви зможете легко перейменувати її.

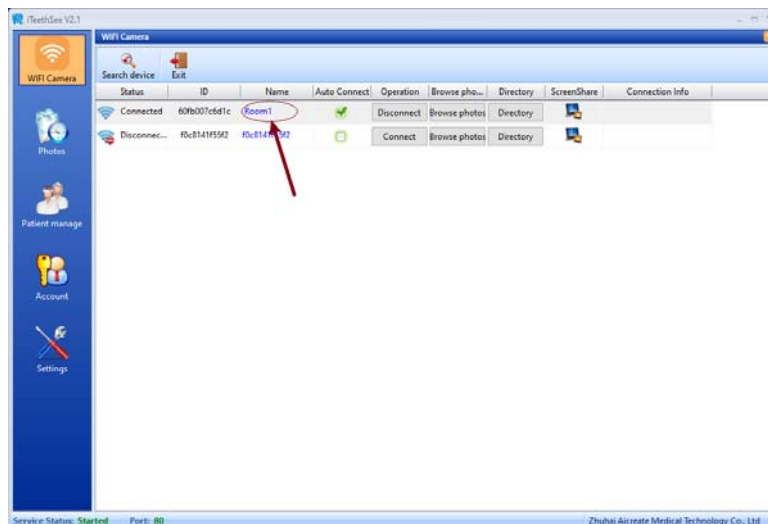


Передайте рентгенівський знімок із ПК на стоматологічний монітор

Перегляньте рентгенівський знімок (зображення чи інші файли) на вашому комп'ютері, не згортайте вікно файлів, перейдіть до iteethsee software і клацніть піктограму під ScreenShare та підтвердьте, і зображення буде надіслано для моніторингу.

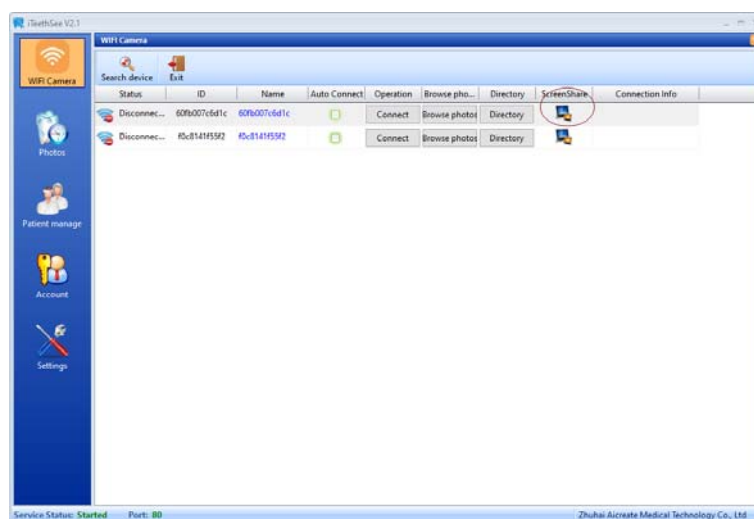

Перегляд фотографій на ПК

Натисніть «Огляд фотографій», щоб переглянути фотографії, збережені на ПК

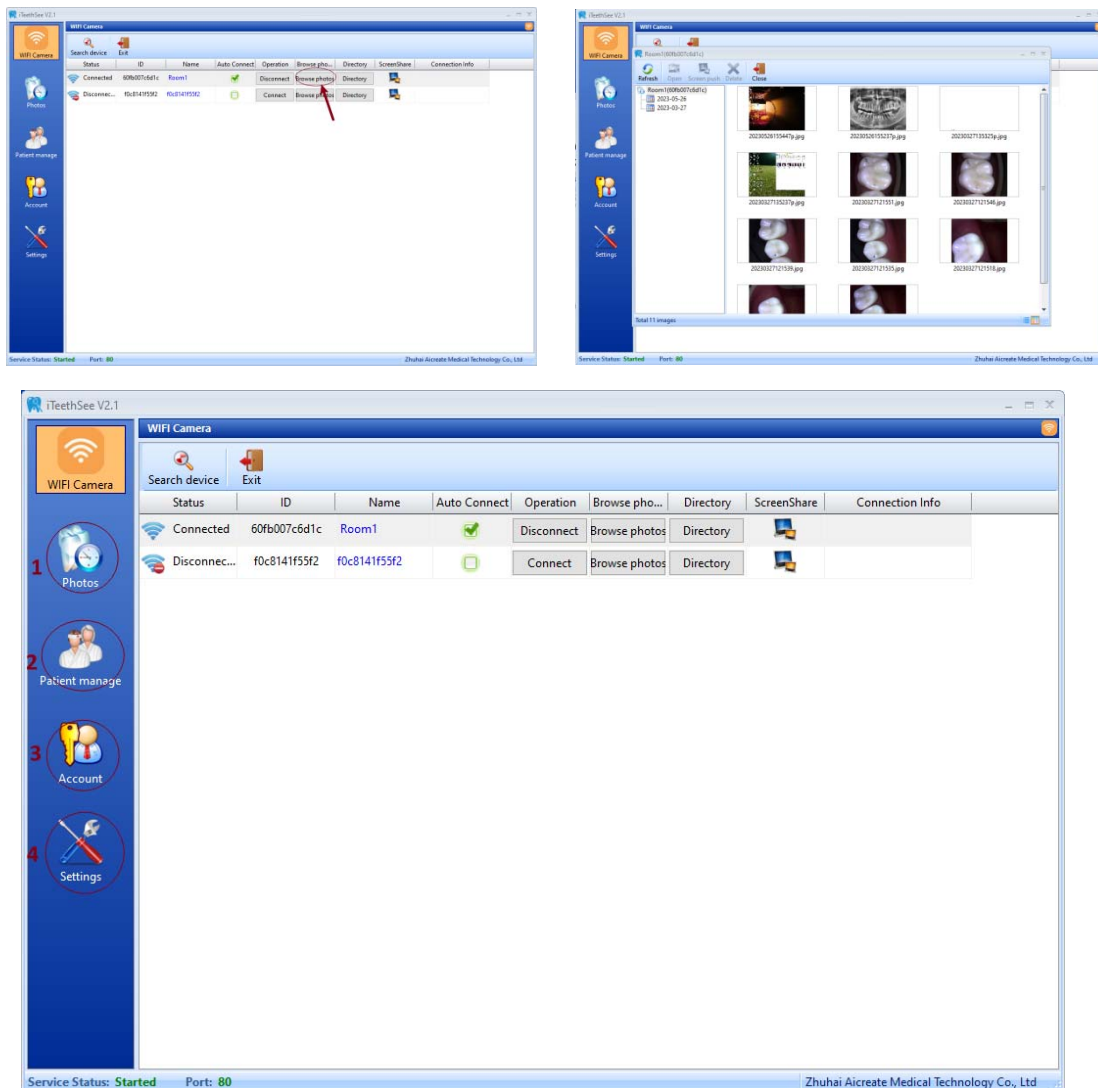

1) Фотографії

Ви можете керувати всіма фотографіями всіх стоматологічних камер в одній системі.

2) Лікування пацієнтів

Ви можете зберігати фото в історії пацієнтів.

3) Обліковий запис

Ви можете змінити ідентифікатор для входу та пароль програмного забезпечення.

4) Налаштування

1. Окрім створення QR-коду, ви також можете встановити співвідношення екрана 16:9 або 5:4. І вид каталогу альбому.